

# Uso de coberturas na Prevenção de Lesão por Pressão

## Orientações para uso da cobertura para proteção

A cobertura multicamadas com silicone deve ser utilizada para proteção de regiões sacral e calcâneos.

1. Limpe e seque a pele;

2. Retire o liner protetor central;

3. Aplique pelo centro, segurando pelas bordas protegidas pelo liner;

4. Remova um liner lateral por vez, ajustando à pele da região;

5. Confirme que não há áreas descoladas;

6. Avalie minimamente diariamente a pele abaixo da cobertura. O silicone permite remover e reposicionar a cobertura;


7. Não usar soluções oleosas, bases/cremes antes da colocação, para não interferir na adesividade do curativo;

8. As trocas devem ser feitas a cada 7 dias ou antes se a cobertura apresentar sujidade, umidade ou estiver solta.

Vista anterior



Vista posterior

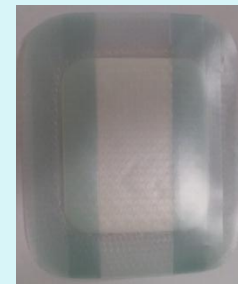

2.



3.



4.



5.

