

## Orientações para uso da cobertura para proteção

1. Limpe e seque a pele;

2. Corte e ajuste o material no local da aplicação;

3. Aplique de forma suave, esticado mas sem tensão, evitando rugas ou dobras;

4. Ajuste o EPI ao formato do seu nariz/face antes de aplicá-lo definitivamente;

5. Confirme que não sente desconforto em algum ponto específico de contato entre a pele e o dispositivo;

6. Verifique a selagem do EPI com o curativo e a pele;

7. Evite usar soluções oleosas, bases/cremes antes da fixação para não interferir na adesividade do curativo;

8. Após a remoção, lave o rosto, seque e hidrate a pele.

Vista anterior



Vista posterior



1. Dividir a placa ao meio mantendo as abas em ambas as tiras



2. Corte ao meio, mantendo as abas em ambas as tiras



Ou use os moldes

Testa

C: 15 x L:3cm




Nariz e face

C: 15 x L:3cm X A:5cm



Orelhas

C: 5 x L:2cm

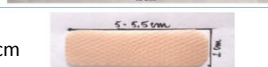

3. Aplique na região da testa, nariz e zigomático



Se necessário, proteja também orelhas



**Retirada:** deverá ser realizada uma pequena tração do produto paralelamente à pele para a retirada ser atraumática.



**Trocas:** realizar a cada final de plantão, quando apresentar sujeira, quando saturado pela umidade (suor) ou desprendendo